



SanoSkin CLEANSER

Oplossing voor wondspoeling

Lösung für die Wundreinigung

Solution pour le nettoyage des plaies


Solution for wound cleaning



CE
0476
250 ml

REF
SC250

Wundreinigung_SC250_SanoMed V4 2020

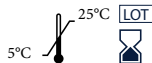

SanoMed Manufacturing bv
Transportweg 13-001
4501 PS Oostburg The Netherlands
www.sanomed-manufacturing.eu

Gebruiksaanwijzing: 1. Draai de sproeikop naar de "SPRAY". 2. Sproei de vloeistof in de wonde. Gebruik absorberend papier om overtollige SanoSkin Cleanser op te vangen. 3. Dep de wond voorzichtig droog. 4. Plaats de sproeikop in de "STOP" positie. SanoSkin Cleanser kan zowel door professionals als door leken worden gebruikt. Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit product bij kinderen. Hoewel dit product onder bepaalde omstandigheden kan worden gebruikt voor kinderen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Mode d'emploi: 1. Tournez l'embout du pulvérisateur en position « SPRAY ». 2. Vaporisez la solution dans la plaie. Utilisez du papier absorbant pour recueillir l'excédent de SanoSkin Cleanser. 3. Séchez la plaie en tamponnant doucement. 4. Placez en position « STOP » après l'emploi. SanoSkin Cleanser peut être utilisé par les professionnels en tant que profanes. Parlez-en à votre pédiatre concernant l'utilisation de ce produit chez les enfants. Bien que ce produit puisse être utilisé pour les enfants dans certaines conditions, des précautions s'appliquent.

Instructions for use: 1. Turn the spray head to the "SPRAY" position. 2. Spray the fluid on the wound. Use absorbent paper to collect excess SanoSkin Cleanser. 3. Gently pat the wound dry. 4. Place the spray head in the "STOP" position. SanoSkin Cleanser can be used by professionals as laymen. Talk to your pediatrician regarding the use of this product in children. While this product may be used for children for selected conditions, precautions do apply.

Bestanddelen/ Composition/Zusammensetzung

Aqua, Polysorbate 20, Glycerol, Sorbitol, Chloorhexidine digluconaat, Natriumhydroxide.

Voorzorgsmaatregelen: Uitsluitend voor uitwendig gebruik. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Niet gebruiken bij irritatie of allergie voor één van de bestanddelen. • Niet als antisepticum gebruiken. • Niet gebruiken op de oogleden of in de ogen. • Neem contact op met een arts als de wond verergert. • Na opening kan SanoSkin Cleanser nog meermaals tot vervaldatum gebruikt worden.

Précautions: Uniquement réservé à un usage externe. A conserver hors de la portée des enfants. • Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'allergie à l'un des composants. • Ne pas utiliser comme solution antiseptique. • Ne pas utiliser sur les paupières ou dans les yeux. • Consulter un médecin si l'état de la plaie s'aggrave. • Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement • Après ouverture, SanoSkin Cleanser peut être réutilisé plusieurs fois jusqu'à la date d'expiration.

Precautions: External usage only. Keep out of reach of children. Do not use if irritation occurs or when allergic for one of the components. Do not use as an antiseptic. Do not use in eyes or eyelids. Contact doctor if wound deteriorates. Do not use when pregnant or breastfeeding. After opening, SanoSkin Cleanser can be used again till end of expiry date.